

Narjes Möbelhandel

**Kaisersbusch 1
D-42781 Haan-Rheinland**

Telefon:


0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobilfunknummer:

0 1 7 7 7 2 8 7 6 5 6

Internet:

www.pflege-sessel.de

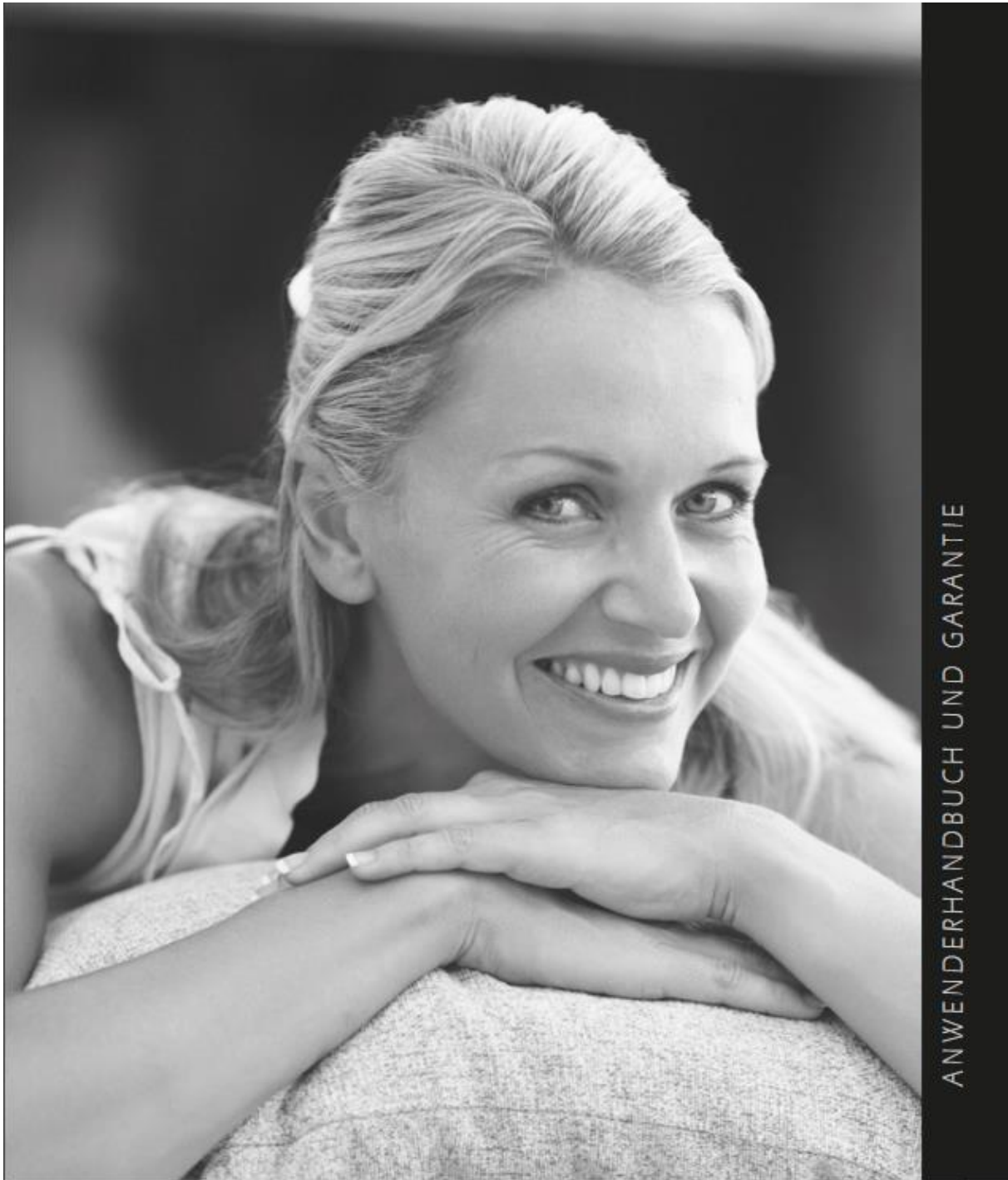

ANWENDERHANDBUCH UND GARANTIE

AUFSTEHSESSEL **GOLDEN TECHNOLOGIES**

Telefon:
021291287

Mobil Nummer:
0177-7287656

Internet
www.Pflege-Sessel.de

Anwendungsbuch und Garantie

AUFSTEHSESSEL GOLDEN TECHNOLOGIES

Liebe Kundin, lieber Kunde, Sie haben einen Aufstehsessel Golden Technologies erworben und wir danken Ihnen für Ihre Wahl und das Interesse, das Sie unseren Produkten schenken. Wir haben dafür gesorgt, eine besondere Sorgfalt bei der Auswahl und Qualität der Sesselkomponente zu schenken, um Ihnen ohne besondere Pflege die möglich größte Zufriedenheit bei der Bedienung zu gewährleisten. Wir wünschen Ihnen, viele Jahre von dem Komfort und den Funktionsfähigkeiten Ihres Aufstehsessel Golden Technologies zu profitieren. Nehmen Sie sich Zeit, dieses Handbuch durchzulesen, um sich mit Ihrem Sessel und dessen Garantie vertraut zu machen. Setzen Sie sich für alle weiteren Informationen mit Ihrem Wiederverkäufer in Kontakt, bei dem Sie ihn gekauft haben. SICHERHEIT: dieser Aufstehsessel ist ein medizinisches Ausrüstungsgut, das entworfen wurde, um Ihnen beim Hinsetzen und Aufstehen zu helfen. Die Kinder sollten sich dessen nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen dürfen. Wenn Sie ihn nicht benutzen, muss der Sessel in Sitzposition bleiben. Wir danken Ihnen noch einmal, einen Sessel Golden Technologies gewählt zu haben

Möbelhandel Narjes



WICHTIGER HINWEIS

**Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig,
bevor Sie Ihren Aufstehsessel installieren und benutzen.**

- Ihr Aufstehsessel wurde mit ausgewählten und getesteten Komponenten und "Technologien" entworfen, um seine Festigkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern.
- Eine ganz besondere Sorgfalt wird der Qualitätskontrolle der Sessel geschenkt.
- Ihr Aufstehsessel ist ein medizinisches Ausrüstungsgut. Insofern werden Sie gebeten, ihn mit Vorsicht zu benutzen und sich zu sichern, dass Sie ihn aus gesichertem Stand für Sie und Ihre Umgebung benutzen. Die folgenden Hinweise empfehlen Ihnen die zu ergreifenden Vorschriften, um sich Ihres Sessels betriebssicher zu bedienen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie beim Auspacken Ihres Sessels darauf, dass Sie sich nicht verletzen oder den Sessel beschädigen. Die Plastikverpackungen müssen außer Reichweite von Kindern bleiben, um jede Erstickungs-, oder Atemnotgefahr zu vermeiden.
- Halten Sie die Kinder und Haustiere von Ihrem Sessel ab, wenn Sie ihn benutzen. Vermeiden Sie die Nähe von "Hindernissen" (Wand, Konsole/Steuerpult, Gehstock, Gehrahmen...), die den richtigen Betrieb des Sesselmechanismus in Gang stören können.
- Lassen Sie keine Kinder mit dem Sessel spielen oder ihn benutzen.
- Die Fernbedienung kann abgeschaltet werden und außer Reichweite der Kinder gelegt werden, wenn Sie Ihren Sessel nicht benutzen.
- **Wenn der Sessel nicht benutzt wird, ist es vorziehbar, ihn in Sitzposition mit den hinteren Füßen, Führungsschuhen oder hinteren Sesselgleitern am Boden zu lassen.**
- **Lassen Sie sich nicht in Ihren Sessel fallen, wenn Sie sich hinsetzen.**
- **Lassen Sie niemanden sich auf die Armlehnen oder die Beinstütze oder auf Ihre Knie setzen, wenn Sie im Sessel sitzen.**
- Stecken Sie Ihre Finger oder Hände nicht zwischen die verschiedenen Kissen, zwischen die Sitzfläche und die Armlehnen, wenn Sie sitzen oder wenn Sie da sitzen oder wenn der Sessel betätigt wird.
- Schalten Sie den Sessel ab, bevor Sie nach Gegenständen suchen, die unter oder hinter den Sessel gefallen sind.
- Betätigen Sie den Sessel nicht, wenn ein Hindernis unter oder vor der Beinstütze, unter oder hinter dem Sessel ist.
- Rauchen Sie in Ihrem Sessel nicht, wenn er betätigt wird, wenn Sie den Mechanismus mit der Fernbedienung betätigen oder wenn Sie sich darin ausruhen.
- Um Stromunfälle zu vermeiden, tauchen Sie keines der elektrischen Elemente Ihres Sessels in eine Flüssigkeit ein. Spritzen Sie keine Flüssigkeit auf die elektrischen Teile - elektrische Bauelemente niemals öffnen.
- Die Garantie verfällt, wenn ein elektrisches Bauelement von einer nicht ermächtigten Person geöffnet wurde.
- **Versichern Sie sich, dass der Sessel in gutem Abstand zur Wand steht. Wenn Sie diese Vorschrift nicht einhalten, kann es Ihren Sessel beschädigen und die Garantie verfallen lassen.**
- Benutzen Sie keinen Verlängerungskabel, um Ihren Sessel an eine Steckdose oder an den Netzstrom anzuschließen. Die Unterspannungen können den Motor beschädigen. Vermeiden Sie es, eine übermäßige Anzahl von Haushaltsgeräten ans selbe Netzwerk oder an die selbe Steckdose anzuschließen.

Telefon:
0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobil Nummer:
0 1 7 7 - 7 2 8 7 6 5 6

Internet
www.Pflege-Sessel.de

AUFSTELLEN IHRES Aufstehsessel GOLDEN


1. Stellen Sie Ihren Sessel an die ausgewählte Stelle des Zimmers und behalten Sie dabei einen minimalen Abstand von 50 cm zwischen der Wand (oder jedem weiteren Hindernis) und dem Hinterteil des Sessels. (gerade Rückenlehne in Sitzposition) siehe die Tabelle unten.

DIE UNTEN LIEGENDE TABELLE WEIST AUF DEN EINZUHALTENDEN ABSTAND FÜR IHREN SESSEL HIN.

Notigen Abstand einzuhalten, um die Rückenlehne ganz zu neigen :

Golden Ref.	Modell	Einzuhaltender Abstand
PR122	Premium Komfort Sessel	43 cm
PR359	Klassischer Komfort Sessel	43 cm
PR369	Klassischer Komfort Bi-Motorig	62 cm
PR501	Komfort Plus Sessel	45 cm
PR501JPT	JP mini Komfort Plus Sessel	43 cm
PR610	Moderner Komfort Sessel	48 cm
PR608	Bi-motorige moderner Komfort Sessel	64 cm
PR505	Bi-motorige Plus Sessel	64 cm
PR123	Bi-motorige Premium Komfort Sessel	63 cm
PR505JPT	Bi-motorige mini Komfort Plus Sessel	53 cm
PR756	Bi-motorige Luxus Komfort Sessel	63 cm
PR5011	Komfort Sessel Übergroße	50 cm
PR505T	bi-motorige Komfort Sessel Übergroße	70cm
PR501S23	Komfort Mini Für Belebte Personen	50cm
PR609	Bi-motorige XL Maxi Flex Komfort Sessel	65 cm
PR501LRG	XL Komfort Sessel	46 cm
PR505LRG	Bi-motorige XL Komfort Sessel	51 cm
PR501M26	XXL Komfort Sessel	46 cm
PR502 W33	Tri-motorige XXXL Komfort Sessel	51 cm

2. Einige (dicke) Teppiche können die richtige Betätigung Ihres Sessels stören. Versichern Sie sich, dass die Beinstütze nicht am Teppich reibt, wenn Sie ihn betätigen.
3. Packen Sie den Transformator aus und stecken Sie zwei 9-Volt Alkalin-Batterien hinein (nicht mitgeliefert).
4. Stecken Sie den Fernbedienungsstecker in die vorgesehene Steckdose der Seitentasche.
5. Schließen Sie den Stromkabel des Motors an den Transformator an und stecken Sie den Transformator in eine Wandsteckdose mit 220-V Netzstrom.
6. Aufstellung der Rückenlehne. Betätigen Sie die Fernbedienung, bis die Befestigungsklauen der Rückenlehne vom Hinterteil der Sitzfläche gelöst werden.

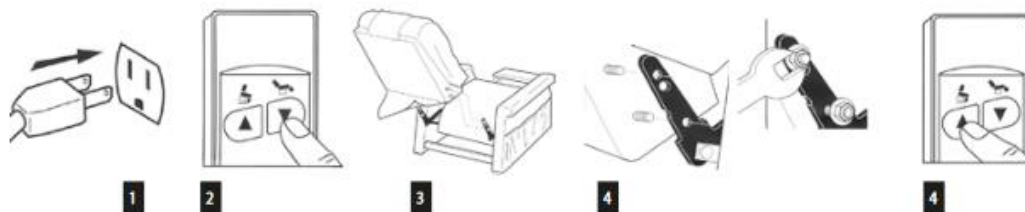

7. Lassen Sie behutsam die Rückenlehne gleiten, um sie an den Befestigungsklauen festzuschrauben. Schrauben Sie die 4 Schraubenmutter zu.
8. Für die bi-motorigen Komfort-Modern, bi-motorigen Premium Komfort, bi-motorigen mini Komfort Plus, bi-motorigen Luxus Komfort: (die bi-motorigen/Aufstehsessel):: Stecken Sie den Bolzen am Ende des zweiten Motors in das Befestigungsband der Rückenlehne ein.

Telefon:
0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobil Nummer:
0 1 7 7 -7 2 8 7 6 5 6

Internet
www.Pflege-Sessel.de

ANWENDERHANDBUCH UND GARANTIE

9. Stellen Sie den Sessel in die Sitzposition auf.
10. Spannen Sie das Stoffstück der Rückenlehne und binden Sie es mit Klettverschluss am unteren Teil des Sessels.
11. Versichern Sie sich, dass der Boden "eben" ist. Wenn nicht, gleichen Sie das Niveau mit Hilfe der verstellbaren FüÙe aus (Einstellung der Höhe durch rutschsichere, den Boden nicht markierende Sesselgleiter), die an an-, oder abschraubbaren Gewindestiften angebracht sind. Eine schlechte Anlehnung (Verkeilung) an den SesselfüÙen kann bei der Bedienung ein Knackengeräusch und/ oder eine unstetige und nicht regelmäßige Bewegung während des Betriebs der Mechanismen verursachen.
12. Versichern Sie sich, dass das elektrische Kabel (zwischen dem Zylinder und dem Transformator) nicht in die Gelenke und Mechanismen des Sessels klemmt.

ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKENLEHNE MIT DER SITZFLÄCHE DES 2-MOTORIGEN AUFSTEHSESSEL

Um den Transport zu erleichtern und Ihren Sessel während der Warenbeförderung zu schützen, wird Ihr Sessel in einem kubischen Verpackungskarton mit der abgebauten Rückenlehne geliefert. Er wird vor eventuellen Aufschlägen auf diese Weise geschützt. Die Zusammensetzung der Rückenlehne mit der Sitzfläche wird Ihnen einige Minuten nehmen, indem Sie folgenden Etappen folgen :

Etappe 1 Schließen Sie die Fernbedienung an den Sessel an (Anschlussstecker am Boden der Seitentasche). Schließen Sie den Sesselschluss an den Transformator und dann den Stecker des Transformators an die Netzsteckdose an.

Etappe 2 Drücken Sie auf die geeignete Fernbedienungstaste, bis die Fußstütze hochgesteuert wird. Diese Handlung wird die Befestigungswinkel der Rückenlehne an der hinteren Sitzfläche am SesselfüÙen enthüllen und zugänglich machen.

Etappe 3 Lassen Sie den unteren Teil der Rückenlehne zwischen die Befestigungswinkel gleiten und die Schraubenbolzen des unteren Teils der Rückenlehne mit den in den Befestigungswinkeln gebohrten Löchern zusammenfallen (2 an jeder Seite).

Etappe 4 Schrauben Sie die Schraubenbolzen an die Schraubenmutter des unteren Teils der Rückenlehne an der Außenseite der Winkel fest.

Etappe 5 Nehmen Sie den Klips und den Stift vom beweglichen Ende des Zylinders der Rückenlehne ab (Jeder Zylinder ist an der hinteren Sitzfläche und sein Ende ist frei). Lassen Sie den Befestigungskopf und die Befestigungstange des Zylinders an der Rückenlehne zusammenfallen (indem Sie den Zylinder mit der Fernbedienung steuern oder die Rückenlehne neigen). Setzen Sie sie mit dem Stift zusammen und befestigen Sie das Ganze mit dem Klips.

Etappe 6 Positionieren Sie mit der geeigneten Fernbedienungstaste den Sessel in der Sitzposition wieder.

Etappe 7 Heften Sie den hinteren Stoff des Sessels am dazu vorgesehenen Klettverschluss am unteren Querbalken des Holzrahmens.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben, um den verschiedenen Etappen der Zusammensetzung zu folgen. Wir wünschen Ihnen jetzt vom Komfort Ihres Sessels ganz zu profitieren, um zu lesen, sich zuzurehnen oder Ihre Lieblingssendungen zu genießen.

BEDIENUNGSRATSCHLÄGE

LASSEN SIE SICH BEIM HINSETZEN NICHT IN IHREM SESSEL FALLEN.

Wenn Sie den Mechanismus Ihres Sessels betätigen, achten Sie darauf, in einer guten Position zu sitzen, im Zentrum des Sessels fest und auf der hinteren Sitzfläche bequem zu sitzen.

Beim Webverfahren der Bezüge (Soft Touch Samt, Mikrofasern, Vynil, Skaj) wird Silikone verwendet, um jedem Bezug Nassfestigkeit und fleckabweisende Charakteristiken zu geben. Wenn Sie unglücklicherweise Flüssigkeit im angemessenen Maße auf Ihren Sessel verschütten, wischen Sie sofort die Flüssigkeit mit einem sauberen Lappen ab. (Machen Sie ihn mit lauwarmem Wasser sauber und wischen Sie ihn noch einmal ab).


Telefon:
0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobil Nummer:
0 1 7 7 -7 2 8 7 6 5 6

Internet
www.Pflege-Sessel.de


BEDIENUNG IHRES SESSELS

(2-TASTEN-FERNBEDIENUNG : ALLE 1-MOTORIGEN MODELLE)

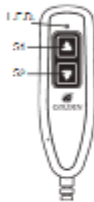

1. Um Ihren Sessel zu neigen, drücken Sie auf die S2-Taste, halten Sie sie bis zur gewünschten Position gedrückt, lassen Sie dann die Taste frei.
2. Um wieder in die Sitzposition zu gelangen, drücken Sie auf die S1-Taste, halten Sie sie bis zur Sitzposition gedrückt, lassen Sie dann die Taste frei.
3. Um den Sessel in die Aufrichtposition zu stellen, drücken Sie auf die S1-Taste, halten Sie sie bis zur gewünschten Position gedrückt, lassen Sie dann die Taste frei.
4. Um wieder in die Sitzposition zu gelangen, drücken Sie auf die S1-Taste, halten Sie sie bis zur Sitzposition gedrückt, lassen Sie dann die Taste frei.
5. Um von der Relax-, oder Ruheposition in die Aufrichtposition zu gelangen, drücken Sie auf die S1-Taste und halten Sie sie gedrückt: der Sessel wird in die Sitzposition hinübergehen und dann anfangen sich aufzurichten. Lassen Sie dann die Taste frei, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben.
6. Um von der Aufrichtposition in die Relax-, oder Ruheposition zu gelangen, drücken Sie auf die S2-Taste und halten Sie sie gedrückt: der Sessel wird in die Sitzposition hinübergehen und dann beginnen sich zu neigen. Lassen Sie dann die Taste frei, wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben.
7. Um sich in den Sessel niederzulassen (in die Aufrichtposition): Stellen Sie sich vor Ihren Sessel, die Waden gegen die Beinstütze. Drücken Sie auf die S1-Taste und richten Sie Ihren Sessel bis zur gewünschten Position auf. Die geeignete Höhe ist aufgrund der Beinlänge und der einzelnen Bedürfnisse von Person zu Person unterschiedlich. Das Sitzkissen soll die Hinterbacken stützen. Der Sessel muss hoch genug aufgerichtet werden, damit Sie nicht brauchen, sich fallen zu lassen. Sie würden dann riskieren, sich zu verletzen und den Sessel zu beschädigen. Drücken Sie auf die S2-Taste, um den Sessel hinunterzubekommen. Während die Sitzfläche nach unten geht, positionieren Sie sich im Sessel, um da bequem zu sitzen. Halten Sie die S2-Taste bis zur Sitzposition gedrückt. Lassen Sie dann die Taste frei.
8. Vom Sessel hinauskommen (in der Aufrichtposition), Drücken Sie auf die S2-Taste und richten Sie Ihren Sessel bis zu der Höhe auf, in der Sie leicht aufstehen. Lassen Sie dann die Taste frei. Stellen Sie den Sessel, wenn Sie weg sind, wieder in die Sitzposition (waagrecht Sitzfläche – hintere Füsse, Führungsschuh oder hintere Sesselgleiter am Boden), damit kein Kind, kein Haustier unter den Sessel gehen kann.

DIE VORPROGRAMMIERTE FERNBEDIENUNG AUTODRIVE

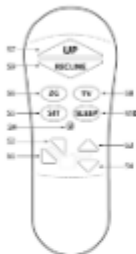

Diese Fernbedienung ist die neueste Innovation im Bereich der zweimotorigen Auflehssessel. Sie erlaubt es Ihnen, mit einem einzigen Tastendruck, den Sessel in eine vorprogrammierte Sitzpositionen zu bringen. Einstellung „Zero Gravity“ ist eine Sitzposition, die Ihnen erlaubt Fernsehen zu schauen, zu schlafen, sich hinzusetzen. Sie erlaubt es Ihnen, jede gewünschte Position einzunehmen. Die meisten unserer Modelle mit zwei Motoren sind mit dieser Fernbedienung ausgestattet.

- Die Tasten UP und RECLINE erlauben es Ihnen, ihren zweimotorigen Auflehssessel wie einen Sessel mit einem einzigen Motor zu bedienen (der mit einer Fernbedienung mit zwei Tasten gesteuert wird.)
- Die Taste ZG fährt den Sessel in die Null-Schwere-Position.
- Die Taste TV fährt den Sessel in die Position „TV“.
- Die Taste SIT fährt den Sessel in die Sitzposition.
- Die Taste SLEEP fährt den Sessel in eine Position, die ideal zum Schlafen ist.
- Die Taste M erlaubt Ihnen, die Programmierung der Tasten zu ändern.
- Die Tasten ZG, TV, SIT und SLEEP sind von Golden Technologies vorprogrammiert. Die Programmierung kann: «ohne Schwierigkeiten» geändert werden.
- Die Tasten (S1), (S2), (S3) und (S4) sind übersichtlich in einem Schema angeordnet, das dem Aufbau des Sessels entspricht: diese Tasten erlauben es Ihnen, problemlos die Neigung der Rückenlehne und der Fußstütze einzustellen. Mit diesen Tasten können Sie ohne weiteres die Programmierung der oben beschriebenen Tasten ändern.
- Die Tasten sind beleuchtet. Wenn Sie eine Taste drücken, leuchtet sie heller.

Telefon:
0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobil Nummer:
0 1 7 7 - 7 2 8 7 6 5 6

Internet
www.Pflege-Sessel.de

ANWENDERHANDBUCH UND GARANTIE

1. Setzen Sie sich in Ihren Sessel mithilfe der Hebe-Funktion: Positionieren Sie sich neben Ihren Aufstehsessel und drücken Sie die Taste [S7] bis sich der Sessel auf die von Ihnen gewünschte Höhe gehoben hat. Diese Höhe ist unterschiedlich für jeden Benutzer und hängt von Körpergröße und Körperbau ab. Heben Sie den Sessel so hoch, dass Sie nicht in den Sessel fallen, wenn Sie sich hinsetzen. Sonst riskieren Sie, dass Sie sich zu verletzen oder der Sessel Schaden nimmt. Drücken Sie anschließend die Taste [S5]. Während sich der Sessel senkt, rücken Sie sich in eine bequeme Sitzposition zurecht. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Sessel komplett in die Sitz-Position gefahren ist. (Die Füße des Sessels stehen dann auf dem Boden.) Dann lassen Sie die Taste los. Sie können weiterhin die Tasten [S6, S8, S9, S10] benutzen, um den Sessel in die programmierten Sitzpositionen zu fahren.
2. Stehen Sie aus Ihrem Sessel auf. Drücken Sie die Taste [S7] und heben Sie den Sessel bis in eine Höhe, die es Ihnen erlaubt, bequem aufzustehen. Lassen Sie dann die Taste los. Sobald Sie aufgestanden sind, fahren Sie mit Hilfe der Taste [S5] den Sessel in seine Sitzposition zurück. (Die Füße des Sessels stehen dann auf dem Boden.) Damit verhindern Sie, dass Kinder, Haustiere oder Gegenstände unter den Sessel gelangen können.

EINSTELLUNGEN

1. **Senken der Rückenlehne:** Benutzen Sie die Taste [S1] und halten Sie sie gedrückt bis sich die Rückenlehne in die gewünschte Position gesenkt hat. Lassen sie dann die Taste los.
2. **Heben der Rückenlehne:** Benutzen Sie die Taste [S2] und halten Sie sie gedrückt bis die Rückenlehne in die gewünschte Position gehoben hat. Lassen sie dann die Taste los.
3. **Heben der Fußstütze:** Benutzen Sie die Taste [S3] und halten Sie sie gedrückt bis sich die Fußstütze in die gewünschte Position gehoben hat. Lassen sie dann die Taste los.
4. **Senken der Fußstütze:** Benutzen Sie die Taste [S4] und halten Sie sie gedrückt bis sich die Fußstütze in die gewünschte Position gesenkt hat. Lassen sie dann die Taste los.

Anmerkung: Die Motoren schalten sich automatisch ab, wenn die Maximalposition erreicht wird (sowohl beim Senken als auch beim Heben), selbst wenn Sie die Taste weiterhin gedrückt halten. Wenn sie beim Verstellen der Rückenlehne oder der Fußstütze über die gewünschte Position hinausgefahren sind, benutzen Sie die entsprechenden Tasten, um in die Gegenrichtung zu fahren. Sie können solange hin- und herfahren, bis Sie Ihre gewünschte Position eingestellt haben.

DEAKTIVIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die Fernbedienung ein- und auszuschalten:

1. Um die Fernbedienung auszuschalten (komplette Deaktivierung), drücken Sie erst die Taste M [SM] für 4 Sekunden und anschließend die Taste UP [S7].
2. Um die Fernbedienung wieder einzuschalten, drücken Sie erst die Taste M [SM] für 4 Sekunden und anschließend die Taste UP [S7].

TEILWEISE DEAKTIVIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Wenn Sie bestimmte Funktionen Ihrer Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren möchten, folgen sie den untenstehenden Schritten, um alle Tasten zu deaktivieren, mit Ausnahme der Tasten [S7] und [S9].

1. Um eine Funktion der Fernbedienung zu sperren, halten Sie die Taste M [SM] für vier Sekunden gedrückt, bis die kleine Anzeige an der Fernbedienung anfängt zu blinken.
2. Drücken Sie in direkter Folge die Tasten [S1], [S2], [S3] und [S6].
3. Um eine Funktion der Fernbedienung zu entsperren, halten Sie die Taste M [SM] für vier Sekunden gedrückt, bis die kleine Anzeige an der Fernbedienung anfängt zu blinken.
4. Drücken Sie in direkter Folge die Tasten [S1], [S2], [S3] und [S6].

Anmerkung: Sie können das Verfahren Ihres Aufstehsessels von GOLDEN jederzeit und sofort beenden, beim Heben und beim Senken des Sessels, indem Sie die Tasten der Fernbedienung loslassen. Ein Motor schalten sich automatisch aus, wenn er seine Maximalposition erreicht hat (sowohl beim Senken als auch beim Heben), selbst dann, wenn Sie die Taste weiterhin gedrückt hatten.

Telefon:
0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobil Nummer:
0 1 7 7 -7 2 8 7 6 5 6

Internet
www.Pflege-Sessel.de

ANWENDERHANDBUCH UND GARANTIE

GARANTIE

MIT SEINEM VERTRETER GARANTIERT GOLDEN DEN ERSTEN BENUTZER DES SESSELS GEGEN DIE DEFEKTE DER ELEKTRISCHEN ELEMENTE ODER FERTIGUNGSDEFEKTE FOLGENDERMAßEN:

10 JAHRE GARANTIE

Golden garantiert 10 Jahre lang das Metallgestell des Auflichtsessels. Die Reparaturkosten sind bis zu einem 2-jährigen Zeitraum inbegriffen. **DIE GARANTIE BEINHALTET DIE TRANSPORTKOSTEN** (des Sessels oder des/der Defektteil(e)) oder die Unkosten zur Sesselüberprüfung und Diagnosestellung **NICHT**.

2 JAHRE GARANTIE

Golden garantiert 2 Jahre lang das Holzgestell und den Mechanismus des Sessels (Auhliche, und Neigenmechanismus). Die Reparaturkosten sind bis zu einem jährigen Zeitraum inbegriffen. **DIE GARANTIE BEINHALTET DIE TRANSPORTKOSTEN** (des Sessels oder des/der Defektteil(e)) oder die Unkosten zur Sesselüberprüfung und Diagnosestellung **NICHT**.

2 JAHRE GARANTIE

Golden garantiert 2 Jahre lang den Transformator und den/die Motoren. Die Reparaturkosten sind bis zu einem jährigen Zeitraum inbegriffen. **DIE GARANTIE BEINHALTET DIE TRANSPORTKOSTEN** (des Sessels oder des/der Defektteil(e)) oder die Unkosten zur Sesselüberprüfung und Diagnosestellung **NICHT**.

Golden garantiert 2 Jahre lang die Fernbedienung. Die Reparaturkosten sind bis zu einem jährigen Zeitraum inbegriffen. **DIE GARANTIE BEINHALTET DIE TRANSPORTKOSTEN** (des Sessels oder des/der Defektteil(e)) oder die Unkosten zur Sesselüberprüfung und Diagnosestellung **NICHT**.

DIESE GARANTIE GELTEN FÜR PRODUKTE, DIE AUF NORMALE WEISE BENUTZT WURDEN.

BEISPIELWEISE ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG:

- Für die Verschleißteile und besonders die Stoff-, Samt-, Skalbezüge oder andere,
- Wenn ein Teil, das Bestandteil der Garantieleistungen ist, von dem normalen Einsatz abweichender, ungeeigneter Anwendung zugeführt oder nicht ordnungsgemäß gepflegt wurde, oder bei einem Transport oder Lagewechsel beschädigt und dann von nicht befugten Personen geöffnet, geändert oder repariert wurde,
- Wenn die elektrischen Komponenten einer Erschütterung ausgesetzt wurden (auf dem Boden gelagerte Fernbedienung, obwohl eine Halterung (Haken) sich da befindet, um diese Situation zu vermeiden),
- Wenn die Anschlüsse im schlechten Zustand (abgetrennte oder durchgebrannte Schmelze beim Lagewechsel des Sessels, z. B. beim Bodenreinigen, nicht sauber (Staubabblutung) sind oder wenn die Halterung beschädigt wurde (z. B. durch Haustiere),
- Wenn die elektrischen Komponenten einer Flüssigkeit oder einer Überspannung (Blitzschlag) ausgesetzt wurden,
- Wenn der Abstand zur Wand nicht eingehalten wird,
- Wenn der Sesselbenutzer sich in den Sessel fallen lässt,
- Wenn der Sessel über die Toleranzbegrenzungen des Gewichts hinaus belastet wird (Erster Komfort, Premium und Bi-motoriger Premium – 147 kg – Klassischer Komfort, Plus, Luxus, Mod Luxus, Holz, bi-motoriger Moderner, für Belebte und Hochgewachsene – 170 kg – Mini Komfort Plus und Mini Bi-Motoriger – 135 kg – Komfort für Belebte, Extrabele – 227 kg)
- Um die Unkosten durch unnötige Einsätze vor Ort durch einen Reparaturtechniker zu decken (schlechte Anschlüsse, defekte allgemeine elektrische Anlage, Informationen/Auskünfte über das Produkt)

Telefon:
0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobil Nummer:
0 1 7 7 - 7 2 8 7 6 5 6

Internet
www.Pflege-Sessel.de

Möbelhandel Narjes

In den USA hergestellte Sessel von GOLDEN Technologies, Inc.
Wiederverkäufer

Narjes Möbelhandel

**Kaisersbusch 1
D-42781 Haan-Rheinland**

Telefon:

0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobilfunknummer:

0 1 7 7 7 2 8 7 6 5 6

Internet:

www.pflege-sessel.de

Telefon:
0 2 1 2 9 1 2 8 7

Mobil Nummer:
0 1 7 7 - 7 2 8 7 6 5 6

Internet
www.Pflege-Sessel.de